

INFORMATION

No. 2402-05

採血ホルダー付の販売に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。


平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ニプロ株式会社製の採血針ホルダー付を販売することになりましたので、ご案内申し上げます。

謹白

記

■対象器材

採血針ホルダー付 NM-21G(AL) 	採血針ホルダー付 NM-22G(AL) 	採血針ホルダー付 ルアー(AL) 
包装単位: 1箱50個入り 販売価格: 1箱900円(税別)	包装単位: 1箱50個入り 販売価格: 1箱900円(税別)	包装単位: 1箱50個入り 販売価格: 1箱900円(税別)

・そのまま採血を行いたい場合は採血針ホルダー付NM-21G(AL)や採血針ホルダー付NM-22G(AL)を、翼状針をご利用の場合は、採血針ホルダー付ルアー(AL)をお求めください。

(裏面に続く)

■変更日


順次、販売させていただきます。

株式会社 武蔵臨床検査所


* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

〈採血針ホルダー付使用時の注意〉

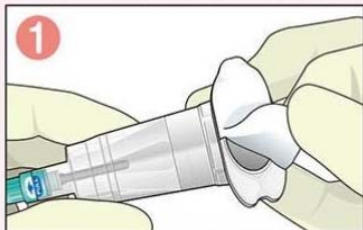

1
採血針ホルダー付の滅菌紙を取り外しましょう。この時患者さんの目の前で外すことをお勧めします。

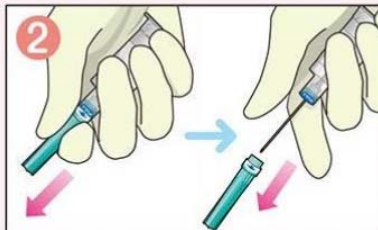

2
上図のように片手で押してコンテナを外すことをお勧めします。両手で引っ張る場合は針刺し事故にご注意ください。



ホルダー内に採血管を入れた後で採血管を回さないこと。採血管を回さない為にも、ラベルを下にして挿入しましょう。

4
採血管をホルダーから抜くとき採血管を回さないこと。

注意 採血管を回すと採血針が緩むことがあります。

使用上の注意

- キャップ部の外径が17.5mm以上の採血管と本品を組み合わせ使用しないこと。
- フィルム式採血管での使用方法については製品化粧箱のフタ部内側を参照ください。