

# INFORMATION

No. 1606-12

## 投与薬剤フルベストラントが エストラジオール(E<sub>2</sub>)測定値に 及ぼす影響についてのお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、エストラジオール(E<sub>2</sub>)検査試薬におきまして、試薬製造販売元より下記の  
連絡がございましたのでご案内申し上げます。  
何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

### ■対象となる検査項目

コード	検査項目名
0736	エストラジオール(E <sub>2</sub> )

### ■内容

閉経後乳癌治療剤として用いられる薬剤「フルベストラント」(商品名:フェソロデックス<sup>®</sup>筋注250mg)を投与されている患者様におきまして、エストラジオール(E<sub>2</sub>)の測定値が、実際の値よりも高値に得られる可能性があることが判明いたしました。(交差反応性 約0.08%)

エストラジオール(E<sub>2</sub>)偽高値の結果により、不適切な評価につながる可能性があるため、ご注意ください。よろしくお願いいたします。

\* 尚、フルベストラントの影響を受けない方法での検査受託は行っておりません。

株式会社 武蔵臨床検査所

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>